보조기기 [벤치혐]



보조기기 명 훈련보조기기-벤치형

사이즈 구분 소형사이즈, 대형사이즈

사용 대상

신장 130cm 이하, 체중 40kg 이하

주요 특징

착석·기립·균형 등의 훈련을 할 수 있는


벤치형의 다목적 보조기기로 2가지의 사이즈가 함께 제공됨. 2개의 사이즈를 동시 사용할 경우 의자와 책상으로도 활용 가능함.

친환경 골판지 소재의 DIY 훈련보조기기로 사용자와 보호자 등이 설명서를 보며

손쉽게 조립하여 사용할 수 있음

상판패드(소)

보조기기 구성

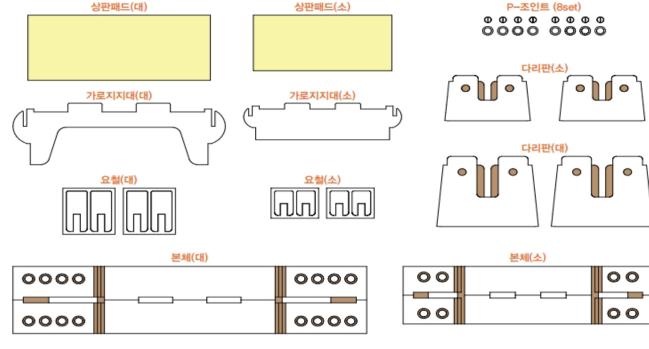


참고 사진






사이즈별 규격

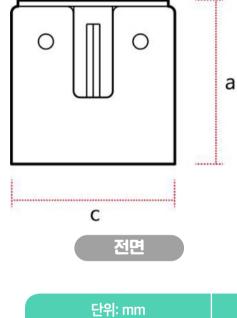

1단

2단

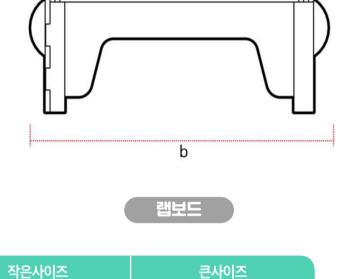

380

452

a. 높이소설			
	3단	-	524
	4단	-	596
b. 좌판 깊이		684	920
c. 좌판 넓이		290	340
주요 기능 및 기기 설명			

250

330


☑ 내구성이 우수한 골판지 사용





최소한의 생활방수를 위한 표면 처리

☑ 접지방식으로 손쉽게 조립 가능

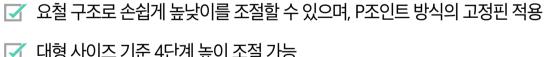

쿠션 매트

☑ 대형 사이즈 기준 4단계 높이 조절 가능

☑ 지면에 닿는 지지대 부분의 안정감을 위하여 사다리꼴로 디자인





☑ 착석 둔부의 압력을 최소화하기 위하여

☑ 매트 뒷면에 붙어 있는 양면테이프로 손쉽게

에코폼 소재의 쿠션 매트 부착

부착 가능

▼ 상판의 하부 지지대가 피부에 닿을 경우 자극을 최소화하기 위하여 골판지의 골 노출을 최소화

▼ 무릎이 상판의 하부 지지대에 닿지 않도록 크기 최소화

▶▶ 보조기기와 함께 제공되는 설명서를 반드시 조립 전 확인해주세요. ▶▶ 보조기기의 모서리가 날카로울 경우 해당 부분을 볼펜이나 자로 눌러서 부드럽게 해주거나

▶▶ 높낮이 조절을 위한 핀을 넣고 뺄 때 손가락이 긁히지 않도록 주의해주세요.

▶▶ 모서리부에 체중 지지가 집중될 경우 전복의 위험이 있으니 주의해주세요.

- 별도의 투명테이프를 부착하여 사용할 수 있습니다.
- ▶▶ 보조기기에 물이나 이물질이 묻었을 때 즉시 닦아 내주세요.

(최소한의 생활방수를 위한 표면 처리가 되어 있으나 오랫동안 묻어 있을 경우 흡수될 우려 있음)