


보조기기 소개 ②

착석보조기기 [좌식형]

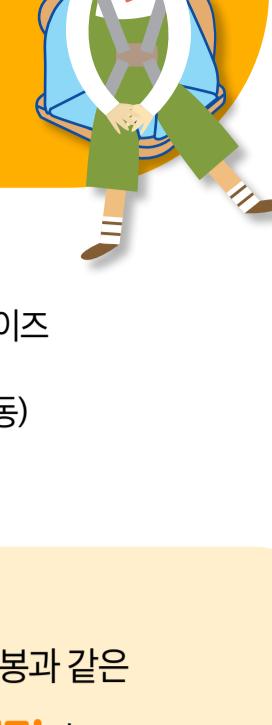

보조기기 명 착석보조기기-좌식형

사이즈 구분 단일사이즈

사용 대상 앉은키 70cm 이하, 체중 40kg 이하(고개를 기울 수 있는 아동)

주요 특징

고개 조절이 가능한 장애 아동 중 착석 시 벨트, 시트봉과 같은

지지가 필요한 경우 사용하며, **좌식형의 착석보조기기**임.

좌식생활을 하는 가정에 적합하며, 의자 다리가 없어 부피가 작고 보관이나 운반이 용이함.

친환경 골판지 소재의 DIY 착석보조기기로 사용자와 보호자 등이



설명서를 보며 손쉽게 조립하여 사용할 수 있음

보조기기 구성




- ① 제품 박스
- ② 조립용 보조기기
- ③ 쿠션 시트
- ④ 5점식 벨트
- ⑤ 설명서

참고 사진

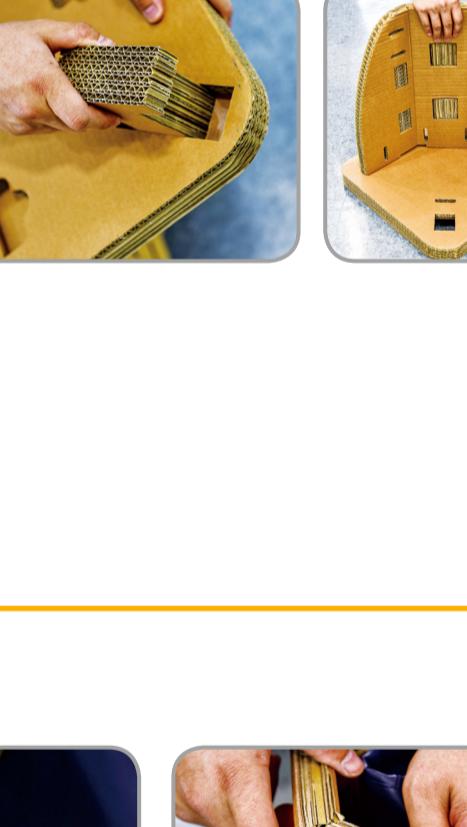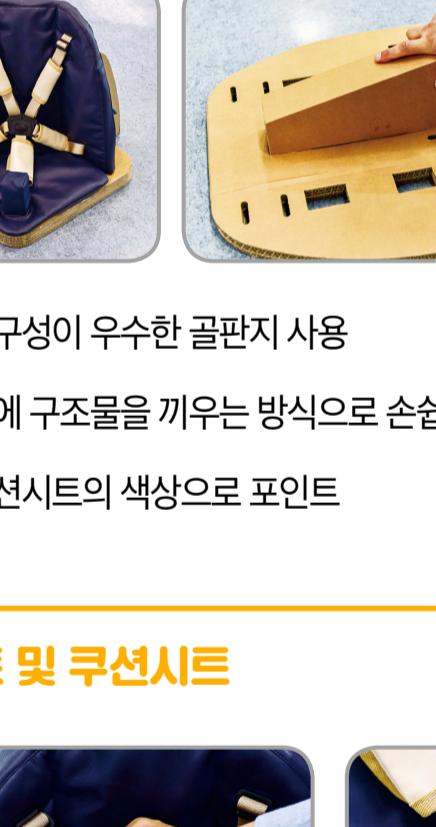

※ 위 사진은 이해를 돋기 위한 참고용이며, 최종 지원 제품과 동일하거나 상이할 수 있음

규격

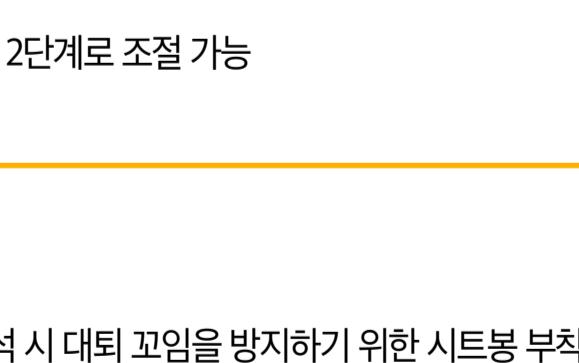

주요 기능 및 기기 설명

재질 및 조립






내구성이 우수한 골판지 사용

흘에 구조물을 끼우는 방식으로 손쉽게 조립 가능

쿠션시트의 색상으로 포인트

벨트 및 쿠션시트

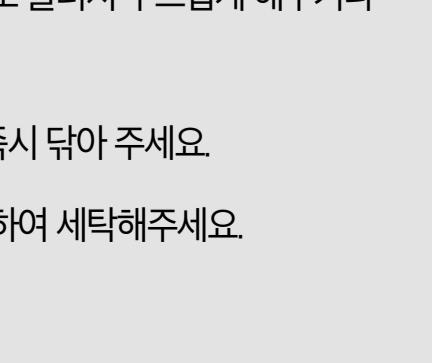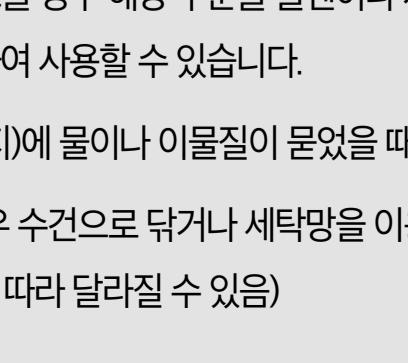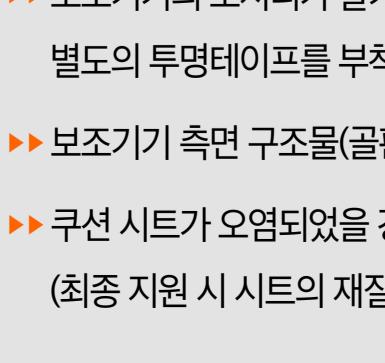


착석 시 안락함 제공과 좌판 오염 방지 등을 위하여 쿠션 시트 적용

어깨와 허리, 양쪽 가랑이를 5방향으로 감싸주는 5점식 벨트를 적용하였으며, 상체 지지력 향상

사용자의 앉은키와 체격에 맞게 벨트의 위치를 2단계로 조절 가능

내전방지봉

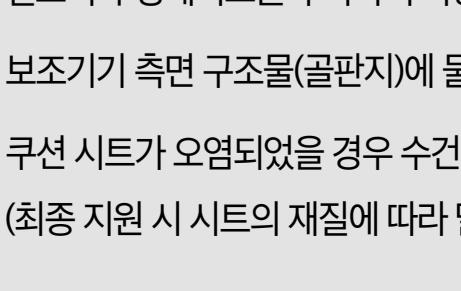

- 착석 시 대퇴 꼬임을 방지하기 위한 시트봉 부착
- 사용자의 피부나 근육에 무리를 주지 않도록 쿠션시트와 동일한 소재의 커버 제공

사용시 주의사항

▶ 보조기기와 함께 제공되는 설명서를 반드시 조립 전 확인해주세요.

▶ 보조기기의 모서리가 날카로울 경우 해당 부분을 볼펜이나 자로 눌러서 부드럽게 해주거나 별도의 투명테이프를 부착하여 사용할 수 있습니다.

▶ 보조기기 측면 구조물(골판지)에 물이나 이물질이 묻었을 때 즉시 닦아 주세요.

▶ 쿠션 시트가 오염되었을 경우 수건으로 닦거나 세탁망을 이용하여 세탁해주세요.

(최종 지원 시 시트의 재질에 따라 달라질 수 있음)